

PRODUCTINFORMATIEBLAD

CUTIMED® SILTEC®

SAMENVATTING

- Schuimverband met een siliconen wondcontactlaag en superabsorbers
- Bestemd voor chronische en acute wonden
- Optimale bescherming van de wond en opname van wondvocht



Wat is Cutimed Siltec?

Cutimed Siltec is een schuimverband met een unieke combinatie van een siliconen wondcontactlaag en superabsorbers. Het verband is bedoeld voor de behandeling van chronische en acute wonden.

Waarvoor is Cutimed Siltec?

Cutimed Siltec is bestemd voor behandeling van acute en chronische wonden, zoals decubitus, beenulcera, diabetische voetulcera, chirurgische wonden, eerste- en tweedegraads brandwonden en donorsites. Het is ook geschikt voor oppervlakkige wonden die niet snel genezen.

Producteigenschappen

- De siliconen wondcontactlaag kleeft zacht op de (gezonde) huid, maar niet op plaatsen waar de wond vochtig is.
- Optimale bescherming van de wond en het nieuwe – nog kwetsbare – weefsel
- De superabsorbers absorberen het wondvocht en houden het vast, ook als het wondgebied onder druk staat van een compressiewindsel.
- De folie aan de bovenzijde van het foamverband is lucht- en waterdampdoorlatend. Ze voorkomt doorlekken van wondvocht

Disclaimer


U dient de behandeladviezen van uw arts op te volgen. Mocht u enig ongemak, doof gevoel, verandering in huidskleur, zwelling of andere afwijkende reactie ervaren, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts.

Gebruiksadvies

- Kies een verband met een zodanige afmeting en vorm, dat het verband aan alle kanten van de wond twee centimeter groter is dan het wondgebied
- Verwijder de beschermende folie aan de achterzijde van het verband
- Leg de zelfklevende zijde op de wond
- Rek hierbij het verband niet op en breng het niet onder spanning aan
- Voor moeilijke plaatsen op het lichaam – het sacrum en de hiel – bestaan speciale varianten: Cutimed Siltec Sacrum en Cutimed Siltec Heel. Deze sluiten precies aan bij de vorm die het lichaam op die plaatsen heeft
- Cutimed Siltec kan tot zeven dagen op zijn plaats blijven

Bewaaradvies en houdbaarheid

Het verband dient op een droge en donkere plaats te worden bewaard in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking. De houdbaarheidsdatum staat vermeld op de verpakking.

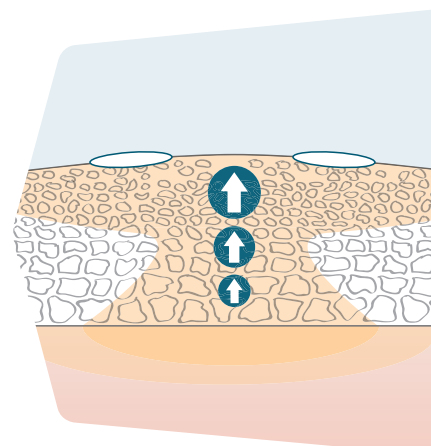

BSN medical BV

Postbus 1376
1300 BJ Almere

www.cutimed.nl
www.bsnmedical.nl
info@bsnmedical.com
Tel 036 - 53 89 596

BSN medical

an Essity company